

# Paletto Bubbelrör

Vi välkomnar dig som användare av KOM I KAPP-REHATEK:s Paletto Bubbelrör. Paletto Bubbelrör är en medlem i "Palettofamiljen" vilket innebär att vår Paletto Plus modell kan kommunicera med Paletto bubbelrör. Tryck exempelvis på röd kontakt på Paletto Plus. Från Paletto hörs "röd" samtidigt som färgen ändras i Paletto Bubbelrör. Detta sker genom att Paletto Plus skickar en IR signal till Paletto Bubbelrör. Hör av er för mer information.

Palettofamiljen kommer på sikt att få fler medlemmar så håll utkik på vår hemsida [www.kikre.com](http://www.kikre.com).

## Bruksanvisning till Paletto Bubbelrör

För att det Interaktiva Bubbelröret skall ge långvarig glädje, är det viktigt att alla som handhar det tar del av denna information.

Installation och användning:

Placera det Interaktiva Bubbelröret på ett stabilt och jämnt underlag. OBS! Bubbelröret får ej placeras i badrum eller annan fuktig miljö.

### Viktigt om Vattnet !

Fyll röret endast med destillerat vatten, så att beläggningar på rörets insida och i backventiler undviks. Destillerat vatten kan köpas på bensinmackar. Var observant på om vattnet blir grumligt och byt vattnet regelbundet. Röret fylls upp till 10 cm under rörets övre kant. Linda en handduk runt röret innan detta fylls, för att skydda podiet från fukt. Använd helst en tratt. Lägg därefter på spegellocket , detta minskar avdunstning och att partiklar faller i.

### Rengöring

Använd vanligt diskmedel, ljummet vatten och en mjuk trasa som virats runt en borste med långt skaft vid rengöringen. Undvik redskap som kan repa röret. Skölj noga bort rester av rengöringsmedlet.


### Tömning av rör

Det korta röret töms enklast genom att bära röret med låda till närmaste avlopp och hälla ut vattnet. Det långa kan tömmas med hävertslang eller så skruvas väggfästet bort och hela röret med låda bäres till närmaste avlopp.


# Fjärrkontrollen



# Anslutningar

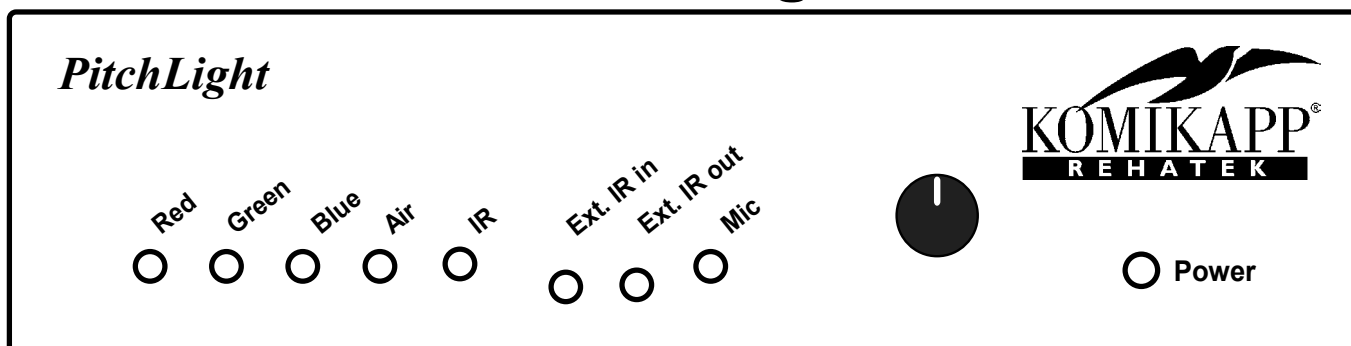


- Red ..... Ingång för KOM I KAPP kontakter styr rött ljus(Extrautrustning)
- Gren ... Ingång för KOM I KAPP kontakter styr gröntljus (Extrautrustning)
- Blue ... Ingång för KOM I KAPP kontakter styr blåttljus (Extrautrustning)
- Air ..... Ingång för KOM I KAPP kontakter styr luftbubbel (Extrautrustning)
- IR ..... Mottagare för Fjärrkontroll
- Ext. .... IR in Ingång för extern mottagare för fjärrkontroll (Extrautrustning)
- Ext. .... IR out Utgång för extern IR-sändare (Extrautrustning)
- Mic ..... Ingång för mikrofon kondensator eller dynamisk (Extrautrustning)
- Power . Spänningsmatningsingång 12V AC 1,6A

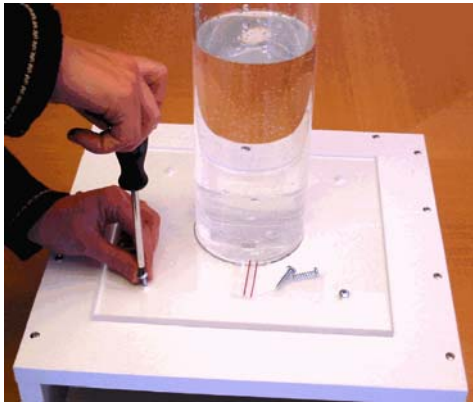

**Bild 5**  
 Skruva fast röret med 4 st skruv i basenheten,  
 fyll upp röret med vätska.  
 Drag av skyddsplasten från spegellocket,  
 lägg det på toppen utav röret.



**Bild 6**  
 Trä på överdraget.

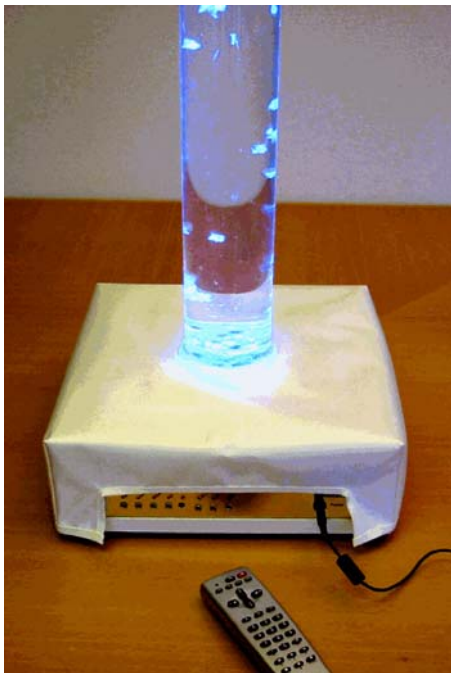

**Bild 7**  
 Anslut transformatorn till "Power".  
 Sätt i batterier i fjärrkontrollen.



Programmera fjärrkontroll enligt följande beskrivning.

1) Tryck "TV".

2) Tryck "▲" och "◀" samtidigt tills  
 den röda lampan tänds.

3) Tryck in kod 0101.

Rikta fjärrkontrollen mot lådan och tryck  
 "TV" sedan "7", nu skall bubbelröret starta.  
 Med "◻" startas/stoppas luft bubblorna.  
 Mängden bubblor regleras med ratten på basenheten.  
 Fullt medsols ger mest bubblor.


## Montering vägg stöd (Endas långt rör)




Väggstöd.



Drag av skyddsplast på väggstödet.

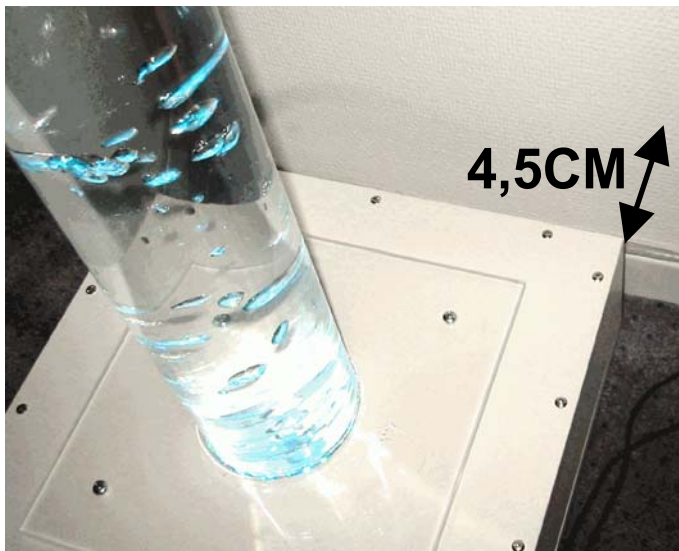

Ställ enheten 4,5cm från väggen för att underlätta montering av väggstöd.

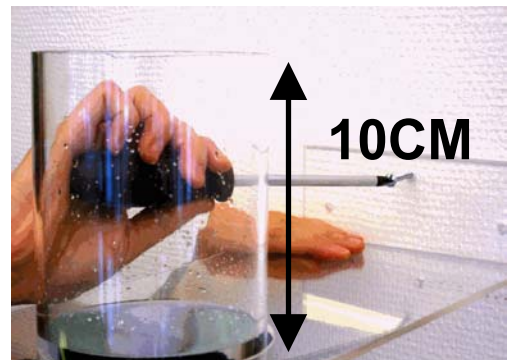

Fäst väggstödet ca 10cm ner på röret.

## Användning av Paletto Bubblerör

Det finns 7 st olika program som kan väljas med fjärrkontrollen.

Tryck "TV" och sedan

"1" Automatisk färgväxling av ljuset mellan röd grön blå.

"2" Ljuset kontrolleras med röst och blås via mikrofon  
Känsligheten ställs in med fjärrkontrollen -▲ / ▲ +.

"3" ORSAK - VERKAN. I detta läge, påverkas ljusspelet av externa kontakter.  
Ljuset tänds endast när kontakten berörs.

"4" TILL - FRÅN. I detta läge, påverkas ljusspelet av externa kontakter.  
Ljuset tänds med ett tryck på kontakten och släcks vid upprepade tryckningar när kontakten berörs.

"5" Detta läge används med externa kontakter.  
Ny färg väljs direkt med motsvarande kontakt.

"6" Frekvens beroende läge.  
Färgen växlar med frekvensen på ljudet via mikrofon.  
Röd=lågfrekvens Blå= högfrekvens.  
Känsligheten ställs in med fjärrkontrollen - ▲ / ▲ +.

"7" Automatisk färgskifning mellan 7st färger.

" " Luftbubblor till/från.

Genom att koppla en fjärde kontakt till ingång "Air", har användaren möjlighet att sätta på och stänga av luftbubblorna med en KOM I KAPP-kontakt.

Detta är mycket effektivt och rekommenderas varmt tillsammans med våra små magnetfiskar som "simmar" upp och ner i röret.

Det finns en automatisk modeändringsfunktion programmerad.

Denna träder i kraft när inte någon av kontakterna eller fjärrkontrollen har använts på ca 30 minuter  
Då går den över till program 7 (automatisk färgskifning).

Avstängning:

Tryck "TV" sedan "  " eller bryt strömmen genom att ta ut kontakten ur eluttaget.

Extra utrustning:

Externa kontakter:

KOM I KAPP-kontakt, rund. Art.nr 95001. Blå, röd, gul grön..

KOM I KAPP-kontakt, rektangulär. Art.nr 90236. Blå, röd, gul grön.

KOM I KAPP-kontakt, IR. Art.nr ???? Blå, röd, gul, grön.

Mikrofon: Art.nr 95104. Anslutning sker till uttag mic

Paletto Plus Art. nr 8551

Lycka till och mycket glädje!


# Montering



**Bild 1**


Paketet ska innehålla följande artiklar.

- 1 st rör
- 1 st spegellock
- 1 st basenhet
- 1 st fjärrkontroll
- 1 st transformator
- 1 st överdrag
- 4 st skruv för att fästa röret på basenheten
- 1 st väggstöd + 3 st skruv (endast långt rör)

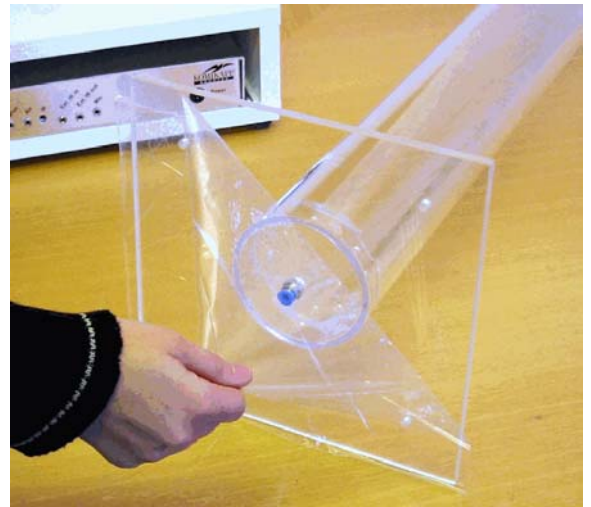

**Bild 2**

Drag av skyddsplasten från rörets undersida.

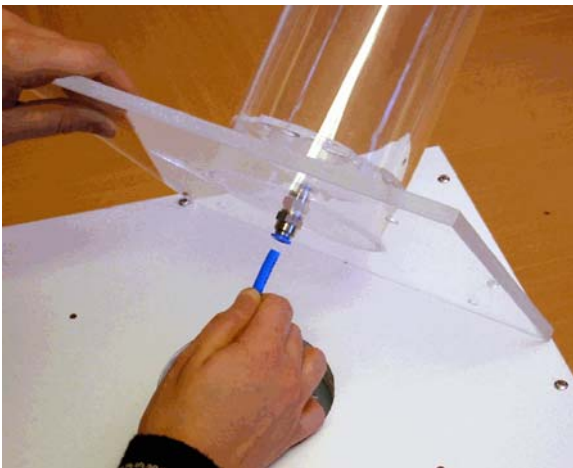

**Bild 3**

Tryck in slangen från basenheten i slangkopplingen på röret så långt det går (ca: 7mm).  
Drag i slangen för att kontrollera att den inte lossnar från slangkopplingen.  
Fyll på ca: 2 liter vätska och låt det stå löst i 30 minuter.



**Bild 4**

Kontrollera att det inte är vätskeläckage vid slangkopplingen.



**KOMIKAPP-REHATEK AB**  
**Kardanvägen 15**  
**432 32 Varberg, SWEDEN**

**Tel: 0340-666870**  
**Fax: 0340-666879**

**[www.kikre.com](http://www.kikre.com)**  
**E-mail: [info@kikre.com](mailto:info@kikre.com)**

# Paletto Bubbelrör

**KOMIKAPP**<sup>®</sup>  
REHATEK



## Interaktivt bubbelrör

Art. Nr 8562-1