

Taikofon;

Kort guide!

Kan benyttes tilkoblet strøm eller lades for bruk uten strømtilkobling.

Kan benyttes med kabel koblet til lydkilde eller ved å overføre lyd via Bluetooth.

Slå på Taikofon ved å trykke inn knappen under flappen i stoffet. Knappen er under innerstoffet. Når du ser et blått lys er den slått på. Taikofon er forladet fra produsent, men må lades igjen etter ca 4 timers bruk. Den lades fullt i løpet av ca 3 timer.

Lydkildetilkobling:

Tilkobling første gang til bluetooth enhet. Sjekk at bluetooth er aktivert på enheten du skal benytte. (Ipad/Iphone el.l)

Skru Taikofon av og på igjen ved holde knappen inne i 3 sekunder. Taikofonen vil da starte å søke etter lydenhet. Taikofon vil fremstå som "Flexound Xperisence" på lydenhet. Trykk evt "søk" på lydenhet for på finne den hvis den ikke kommer opp automatisk.

Den blå lysdioden på Taikofon vil blinke raskt under søket. Rask blinking slutter når den har funnet lydenhet.

De to er nå koblet sammen og du kan spille musikk som vil høres og kjennes i Taikofonen.

For å slå av Taikofonen trykker du på på/av knappen til du hører et lydsignal.

Neste gang du slår på Taikofonen og benytter samme lydenhet vil de automatisk bli koblet mot hverandre.

Tar du i bruk en ny lydenhet må du gjenta tilkoblingsbeskrivelsen over.

(noen lydenheter kan kreve at en tidligere bluetooth kobling kanselleres før du oppretter en ny!)